



Reinigungs- und Desinfektions-Anweisungen AssistX Mobil

Bevor Sie Sender, Empfänger, Netzteil oder andere Komponenten von AssistX Mobil reinigen, schalten Sie sie aus und ziehen Sie alle Kabel ab.

AssistX Mobil sollte nach täglich mit einem zur Verwendung in Krankenhäusern vorgesehenen Desinfektions- und Reinigungsmittel gesäubert werden. Die Reinigung sollte nur mit einem Wischtuch erfolgen. Wischen Sie alle Außenflächen ab und lassen sie sie von selbst trocknen oder befolgen Sie die Wischanleitung.

Verwenden Sie **keine** Sprays, die in die AssistX Mobil-Komponenten möglicherweise Feuchtigkeit eindringen lassen.